

# SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung (kolloidales Gold)

(Speichelproben)

## Kurzanleitung

REF: LFA0401-5N




### Vorbereitung

1. Öffnen Sie Ihre Testpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

Inhalt :


- 1 × Testkassette
- 1 × Steriler Einmaltupfer
- 1 × Röhrchen mit Extraktionspuffer
- 1 × Gebrauchsanweisung

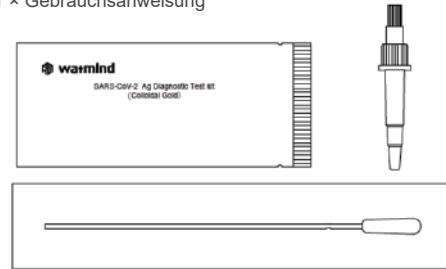

3. Öffnen Sie den Beutel und legen Sie die Kassette auf eine saubere, trockene, flache Oberfläche. HINWEIS: Berühren Sie keine Teile auf der Innenseite der Karte.


### Schritt 1. Ablauf der Probenentnahme

1. Öffnen Sie die Tupferpackung und nehmen Sie den Tupfer heraus.
2. Entnahme von Speichelproben: Drücken Sie die Zungenspitze gegen die untere Kieferwurzel, um den Speichel anzureichern. Bringen Sie den Oropharyngealtupfer für 10 Sekunden unter die Zunge, drehen Sie ihn 5 Mal und tranken Sie ihn vollständig.

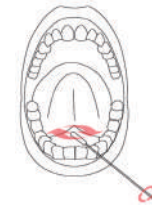


### Schritt 2. Probenextraktion


1. Öffnen Sie den unteren Deckel des Röhrchens, das mit Probenentnahmelösung vorgefüllt ist.
2. Führen Sie den Tupfer in das Probenröhrchen und tauchen Sie anschließend den Tupferkopf vollständig in die Probe ein.
3. Mischen Sie die Lösung, indem Sie den Tupfer mindestens 10 Mal kräftig gegen die Seite des Röhrchens drehen und das Röhrchen 5 Mal von Hand zusammendrücken, damit die Probe auf dem Tupfer vollständig in dem Extraktionspuffer gelöst wird.

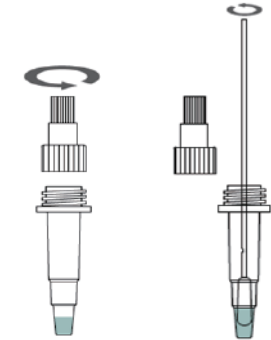

4. Knicken Sie den Tupferkopf ab und belassen Sie ihn in dem Röhrchen.

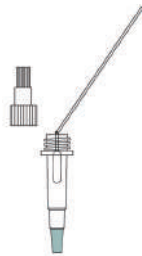

5. Schließen Sie die untere Abdeckung des Röhrchens und schwenken Sie das Röhrchen 5-6 Mal.

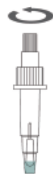

6. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Röhrchens.



### Schritt 3. Testverfahren

1. Geben Sie 100µl (3 Tropfen) der Probe in die Vertiefung auf der Kassette. Schließen Sie den oberen Deckel des Röhrchens.



2. Warten Sie 15 Minuten.

HINWEIS: Die Kassette darf während dieser Zeit nicht bewegt und/oder berührt werden.



### Schritt 4. Auswertung der Testergebnisse

1. Interpretieren Sie die Testergebnisse nach 15-20 Minuten.



Positiv

Negativ



Ungültig

Ein positives Testergebnis muss durch einen PCR-Test bestätigt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte telefonisch an einen Arzt/Hausarzt oder das örtliche Gesundheitsamt. Ohne Konsultation eines Arztes sollte keine medizinisch wichtige Entscheidung getroffen werden. Die Möglichkeit eines falsch-positiven sowie eines falsch-negativen Ergebnisses kann niemals ausgeschlossen werden. Sollten Sie ein negatives Ergebnis erhalten, aber trotzdem Symptome wie Husten, Fieber oder Schnupfen verspüren, empfehlen wir Ihnen, einen Arzt/Hausarzt zu kontaktieren. Auch ohne Symptome und bei negativem Ergebnis halten Sie sich bitte weiterhin an die geltenden Schutzmaßnahmen.

### Symbole

	Verwendung in der In-vitro-Diagnostik		Siehe Gebrauchsanweisung
	Katalognummer		Chargennummer
	Verfalldatum		Herstellungsdatum
	Nicht wiederverwenden		Zwischen 2 und 30 °C lagern
	Von Sonnenlicht fernhalten		Trocken halten
	Hersteller		EU-Bevollmächtigter

Shenzhen Waimind Medical Co., Ltd.  
8th Floor, Building A, No.16-1, Jinhui Road, Jinsha Community, Kengzi subdistrict, Pingshan District, 518118, Shenzhen, China.  
Tel: +86 755-86969964 Fax: +86 755-26658059, <http://www.waimind.com>

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eifestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany